

**EYE DEFINITION HYDRA Plus 1 day**

## NELFILCON A (DD02 en DD03) DAGLENZEN



**GEBRUIKSAANWIJZING – DEZE FOLDER BEVAT BELANGRIJKE GEBRUIKS- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. LEES ZE AANDACHTIG EN BEWAAR DE FOLDER ZODAT U HEM LATER NOG KAN RAADPLEGEN. CONTACTLENZEN DIENEN STEEDS TE WORDEN AANGEPAST DOOR EEN OOGZORGSPCIALIST. HET IS BELANGRIJK DAT U DE AANWIJZINGEN VAN DE CONTACTLENSPECIALIST EN ALLE INSTRUCTIES OP DE VERPAKKING OPVOLGT VOOR EEN CORRECT GEBRUIK VAN UW CONTACTLENZEN.**

### MATERIAAL EN VERPAKKING

**Nelfilcon A (DD02)** zachte contactlenzen bevatten 31% nelfilcon A en 69% water. De lenzen hebben een lichtblauwe tint om ze beter te kunnen hanteren; de tint bevat Cu-phthalocyanine.

**Nelfilcon A (DD02)** contactlezen zijn verpakt in strips van 5 individuele blisterverpakkingen met isotonische, fosfaat-acetaatgebufferde zoutoplossing. De zoutoplossing kan tot 0,02% Poloxameer bevatten.

**Nelfilcon A (DD03)** zachte contactlenzen bevatten 31% nelfilcon A en 69% water. De lenzen hebben een lichtblauwe tint om ze beter te kunnen hanteren; de tint bevat Cu-phthalocyanine.

**Nelfilcon A (DD03)** contactlenzen zijn verpakt in strips van 5 individuele blisterverpakkingen met isotonische, fosfaat-acetaatgebufferde zoutoplossing. De zoutoplossing bevat HPMC en PEG400. De zoutoplossing kan tot 0,05% Poloxameer bevatten.

De lenzen zijn met stoom gesteriliseerd.



**VERZEGELDE SLUITING:** Enkel gebruiken indien de blister intact is.



### GEBRUIKSDOEL

**Nelfilcon A (DD02, DD03)** contactlenzen zijn aangewezen voor overdag dragen (dagelijkse draagtijd: minder dan 24 uur, niet tijdens de slaap) voor de optische gezichtscorrectie van personen met gezonde ogen en een lichte mate van astigmatisme dat het gezichtsvermogen niet beïnvloedt.

Alle Nelfilcon A lenzen zijn bestemd voor éénmalig gebruik. Enkel overdag dragen, dagelijks vervangen.



### AANBEVOLEN SCHEMA VOOR HET DRAGEN EN DE VERVANGING VAN DE LENZEN

Nelfilcon A daglenzen zijn bestemd om éénmalig te worden gedragen en vervolgens weg te gooien aan het einde van elke draagperiode. De maximale dagelijkse draagtijd dient door uw oogzorgspecialist te worden bepaald.

Nelfilcon A daglenzen zijn niet bestemd om te worden gebruikt met contactlensreinigers of desinfectiesystemen. Uw lenzen moeten worden weggegooid na gebruik. Begin elke nieuwe draagperiode met een verse nieuwe lens.

**SLAAP NIET MET DE LENZEN IN.** Nelfilcon A daglenzen zijn niet ontwikkeld om te dragen tijdens het slapen. Draag uw Nelfilcon A daglenzen niet tijdens het slapen.

### MANIPULATIE VAN UW LENZEN

Uw oogzorgspecialist dient u gedetailleerde aanwijzingen te verstrekken voor het aanbrengen en het uitnemen van contactlenzen.

Steeds de handen wassen en afdrogen voordat u de lenzen aanraakt. Schud zachtjes de

blisterverpakking voordat u hem opent. Trek de folie weg. Giet de lens in de palm van uw hand of, indien nodig, laat de lens voorzichtig uit de houder glijden met behulp van uw wijsvinger. Let erop dat de lens niet binnenstebuiten zit, en dat u de juiste lens voor dat oog heeft. Controleer de lenzen voordat u ze aanbrengt, niet aanbrengen indien beschadigd.

Wanneer u uw lenzen uitneemt, let erop dat uw handen volledig droog zijn. Knipper volledig meerdere keren met uw ogen, en, terwijl u naar boven kijkt, schuif dan de lens naar beneden op het witte deel van het oog. Verwijder de lens door ze voorzichtig tussen duim en wijsvinger te nemen.

Indien de lens zich moeilijk laat uitnemen, zorg er dan voor dat u niet in het oogweefsel knijpt. Breng comfort- en bevochtigingsdruppels aan en probeer het opnieuw na enkele minuten.

- Gebruik nooit pincetten, zuignappen, scherpe voorwerpen of uw nagels om uw lenzen uit uw ogen te nemen of om ze uit de lenshouder te halen


### **WANNEER DE LENZEN NIET TE DRAGEN**

Contactlenzen dienen niet te worden gedragen bij bepaalde gezondheidstoestanden of omgevingsvoorwaarden. Condities die veilig contactlensdragen kunnen belemmeren of verstoren, zijn ondermeer:

- Allergie, ontsteking, infectie of irritatie van of rond het oog en de oogleden.
- Perioden van zwakkere gezondheid, zoals ernstige verkoudheden of griep.
- Het gebruik van sommige geneesmiddelen, inclusief oogmedicatie.
- Ontoereikende traanfilm (droge ogen).
- Uitermate droge of stoffige omgevingen die het contactlensdragen zeer oncomfortabel maken.
- Watersporten zonder gebruik te maken van een zwembril.

Overleg met uw oogzorgspecialist betreffende deze of andere condities

### **BELANGRIJKE PUNTEN OM TE ONTHOUDEN**

- Product is alleen bestemd voor éénmalig gebruik. Hergebruik kan het risico op een infectie of verminderde productprestaties doen toenemen.
- Laat uw contactlenzen **nooit** door iemand anders dragen, dit kan micro-organismen verspreiden, hetgeen tot ernstige ooggezondheidsproblemen zou kunnen leiden.
- Controleer elke dag uw ogen. Uw ogen moeten er gezond uitzien, comfortabel aanvoelen en u moet goed kunnen zien.
- Het wordt aanbevolen dat contactlensdragers hun oogzorgspecialist regelmatig raadplegen, overeenkomstig diens aanwijzingen.
- Gebruik lenzen niet na de vervaldatum. 
- Bij gedimd licht kunnen dragers van getinte lenzen mogelijk een verminderde contrastgevoeligheid ondervinden. Dragere van progressieve lenzen kunnen een verminderd gezichtsvermogen ondervinden in alle lichtomstandigheden.
- Noteer de juiste lenssterkte voor elk oog.
- Alvorens de lens aan te brengen, controleer of de lenssterkte op iedere blister overeenstemt met de benodigde sterkte voor dat oog.
- Neem altijd reservelenzen met u mee.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van zeep, lotions, crèmes, cosmetica of deodorants aangezien deze irritatie kunnen veroorzaken als ze in contact komen met uw lenzen.
- Breng uw lenzen aan **voordat** u make-up aanbrengt en neem ze uit **voordat** u de make-up verwijdert.
- Vermijd het gebruik van spuitbussen zoals haarlak in de buurt van uw ogen wanneer u lenzen draagt omdat dit irritatie kan veroorzaken.
- Vraag het advies van uw oogzorgspecialist over het dragen van contactlenzen tijdens het sporten, inclusief zwemmen.
- Neem de lenzen uit wanneer u wordt blootgesteld aan schadelijke of irriterende dampen.
- Breng contactlenzen nooit in contact met niet-steriele vloeistoffen, (inclusief leidingwater en speeksel) daar microbiële besmetting kan optreden, hetgeen kan leiden tot permanente oogbeschadiging.

- Verwittig uw werkgever dat u contactlenzen draagt, in het bijzonder als u oogbescherming dient te gebruiken tijdens het werk.
- Indien een nelfilcon A daglens wordt blootgesteld aan de lucht, wanneer ze niet op het oog zit, zal ze uitdrogen en broos worden. De lens dient dan te worden weggegooid en te worden vervangen door een nieuwe.

### MOGELIJKE PROBLEMEN

Hoewel het dragen van zachte contactlenzen heel wat voordelen biedt aan de drager, is het mogelijk dat problemen zouden kunnen optreden welke aanvankelijk kunnen worden waargenomen als één of meer van de volgende tekens:

- Gevoel dat zich een vreemd voorwerp in het oog bevindt
- Lens wordt hinderlijk
- Roodheid van de ogen
- Gevoeligheid voor licht
- Brandend of stekend gevoel, jeuk of tranende ogen
- Verminderde gezichtsscherpte
- Regenbogen of halo's rond lichtbronnen
- Toegenomen oogafscheidingen
- Ongemak/pijn
- Ernstige of lang aanhoudende droge ogen

Indien deze symptomen worden genegeerd, kan dit leiden tot meer ernstige complicaties.

### WAT INDIEN ZICH EEN PROBLEEM VOORDOET

Als om het even welke van de bovengenoemde symptomen zich voordoet:

- **NEEM DE LENS (LENZEN) ONMIDDELIJK UIT.**
- Controleer uw oog in de spiegel, ga na of er enige onregelmatigheden zijn.
- Als het ongemak of probleem hiermee ophoudt, breng dan een verse, nieuwe lens aan.
- Indien de bovengenoemde symptomen aanhouden na het aanbrengen van een nieuwe lens (lenzen), neem de lens (lenzen) dan **ONMIDDELIJK** uit en neem dan dadelijk contact op met uw oogzorgspecialist. Mogelijk is het probleem toe te schrijven aan een ernstige aandoening zoals een infectie, een hoornvlieszweer of iritis. Deze aandoeningen kunnen snel erger worden en kunnen tot blijvend gezichtsverlies leiden. Minder ernstige reacties zoals abrasie, verkleuring van het epitheel en bacteriële conjunctivitis moeten verzorgd worden en moeten in een vroeg stadium correct worden behandeld om complicaties te voorkomen.
- Indien een lens op uw oog scheurt, zal dit oncomfortabel aanvoelen. Er is geen reden tot ongerustheid, aangezien het onmogelijk is dat een contactlens, of een deel ervan, zoek raakt achter het oog. Verwijder de stukjes voorzichtig door ze samen te knijpen, zoals u normaal doet bij het uitnemen van een lens. Indien de lensdeeltjes niet zo gemakkelijk te verwijderen zijn, vermijd dan om hard in het oogweefsel te knijpen. Spoel met een zoutoplossing. Indien dit niet helpt, neem contact op met uw oogzorgspecialist en vraag om hulp. Uw oogzorgspecialist kan de lens gemakkelijk terugvinden door gebruik te maken van fluoresceïne.
- Occasionele droogheid kan worden tegengegaan door volledig meerdere keren met de ogen te knipperen of door het gebruik van comfort- en bevochtigingsdruppels.

Indien de droogheid aanhoudt, contacteer uw oogzorgspecialist.

### AANVULLENDE INFORMATIE

Het risico op een mogelijk probleem kan worden verminderd door de tekens te herkennen en het advies op te volgen onder: "Wat indien zich een probleem voordoet". Het dragen van contactlenzen verhoogt het risico op ooginfecties. Roken verhoogt nog meer het risico op keratitis ulcerosa bij contactlensdragers.



Fort Worth, TX USA 76134-2099



Alcon Laboratories (UK) Ltd.  
Frimley Business Park  
Frimley, Camberley  
Surrey, GU16 7SR,  
Verenigd Koninkrijk



**Abbreviations for lens specifications:**

DIA	Diameter
BC	Radius
PWR	Sterkte
L	Links
R	Rechts